




# Patron masque buccal

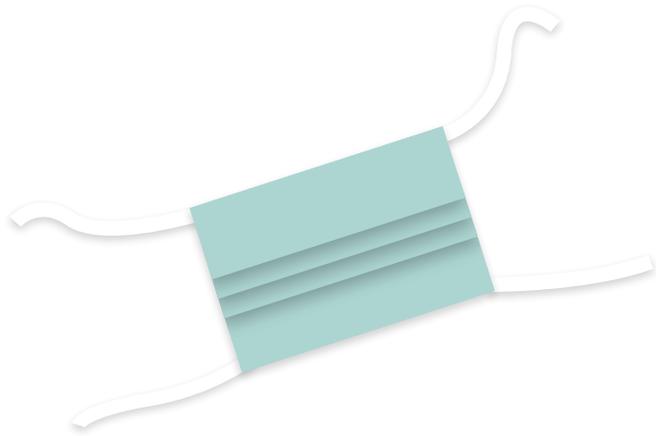


PARTIE 1  
extérieur du masque

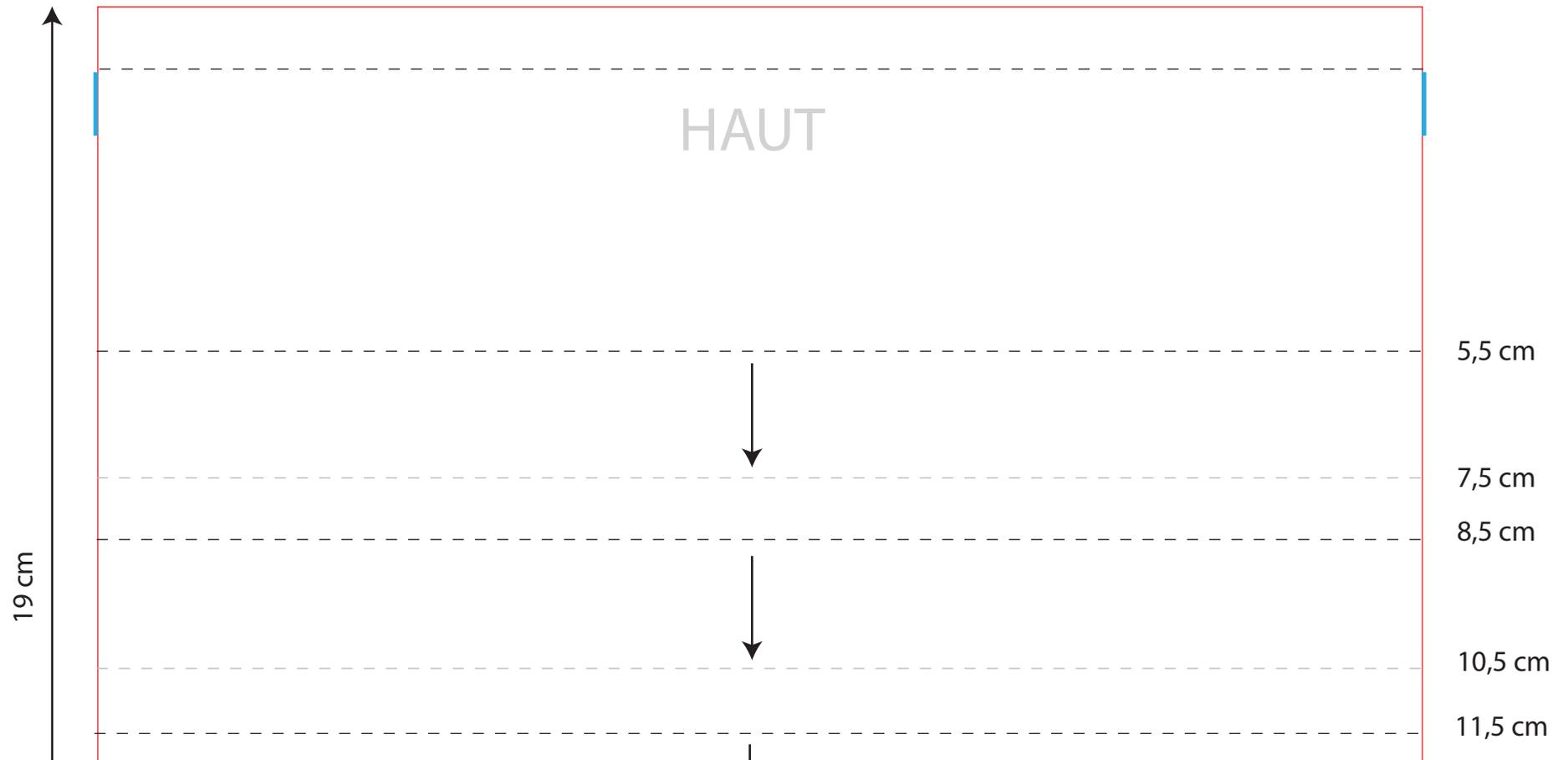

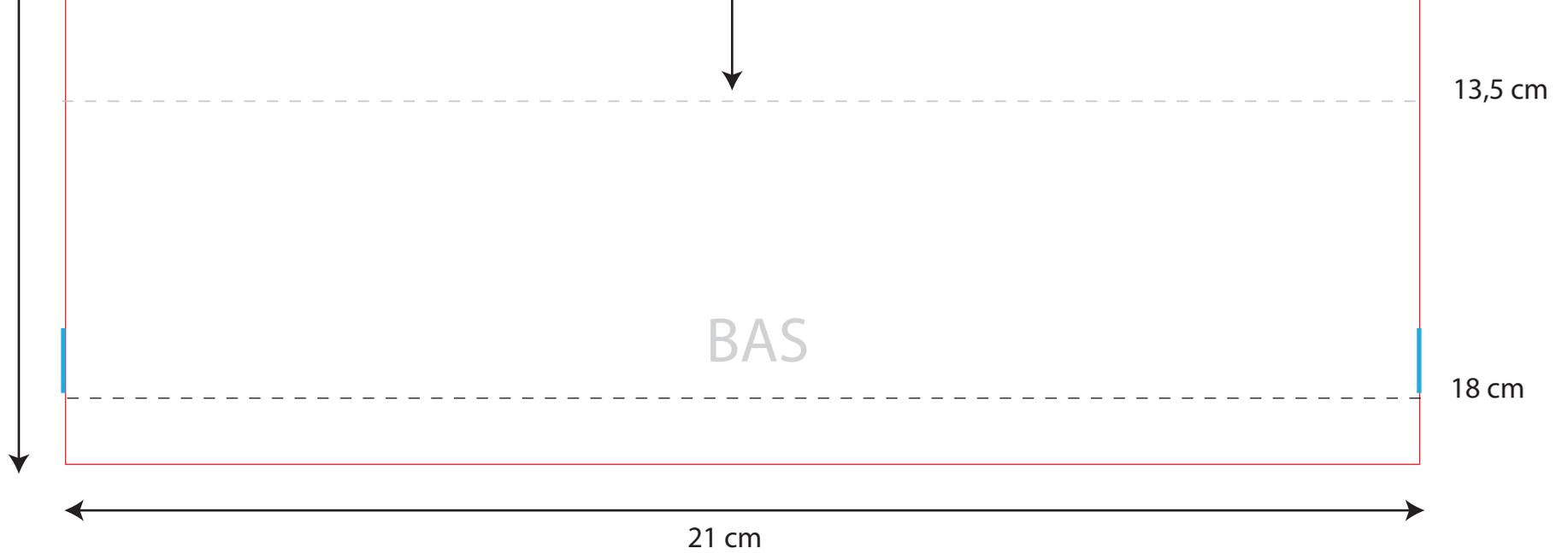

### Légende

- coupe
- - - pli
- - - pli creux
- emplacement des liens

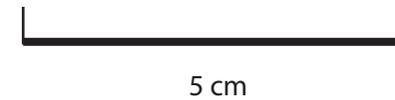



**Document original : SFP SANTE**

[https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317\\_TutoMASK\\_COVID19\\_NL.pdf?fbclid=IwAR2ow8elyzpdqywl\\_3DIFCtve1qUcrOsq2e1S-oaacyJ858KKCeOeJR8ss](https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317_TutoMASK_COVID19_NL.pdf?fbclid=IwAR2ow8elyzpdqywl_3DIFCtve1qUcrOsq2e1S-oaacyJ858KKCeOeJR8ss)

# Patron masque buccal


PARTIE 2  
intérieur du masque (côté bouche)

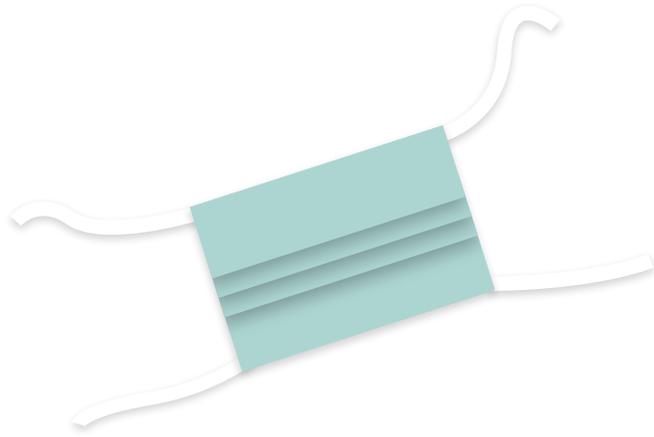

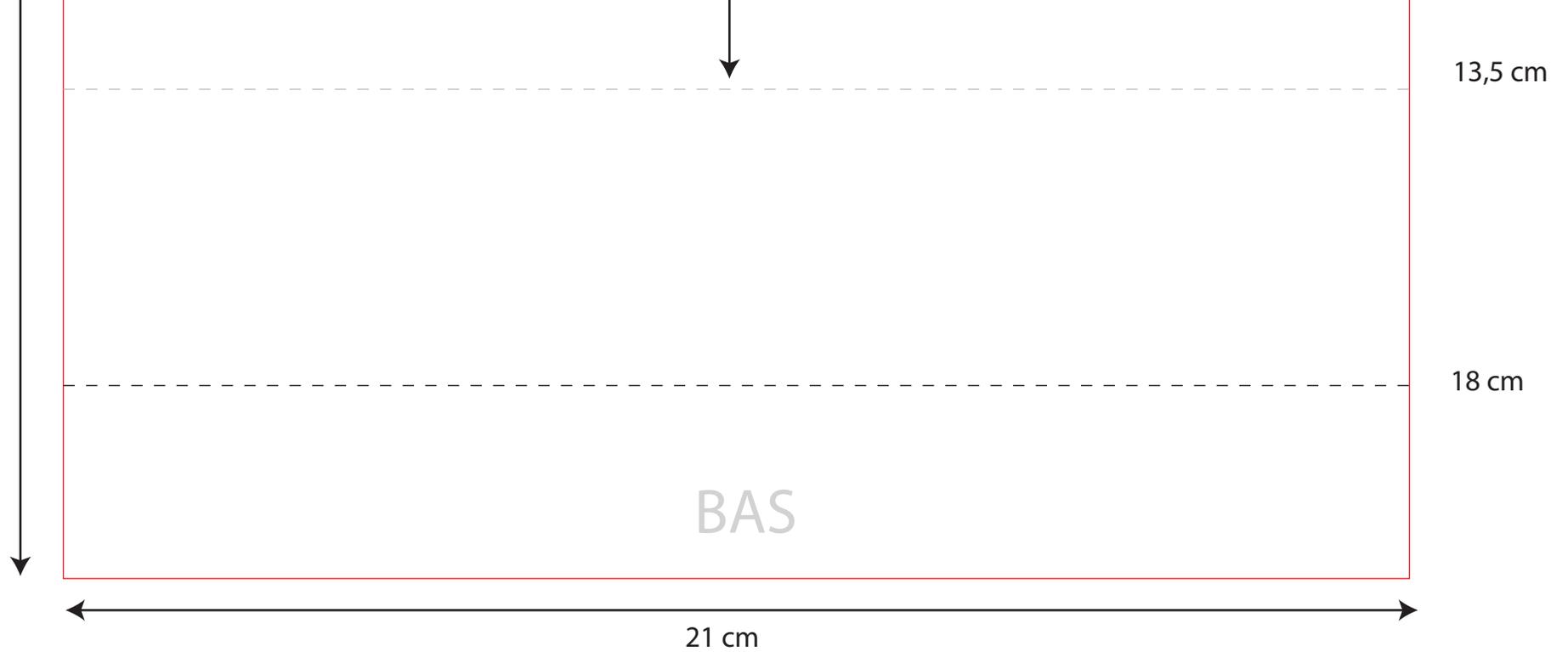

### Légende

—	coupe
- - -	pli
- - -	pli creux

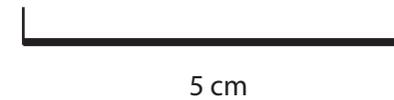

**Document original : SFP SANTE**

[https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317\\_TutoMASK\\_COVID19\\_NL.pdf?fbclid=IwAR2ow8elyzpdqywl\\_3DIFctve1qUcrOsq2e1S-oaegyJ858KKCeOeJR8ss](https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317_TutoMASK_COVID19_NL.pdf?fbclid=IwAR2ow8elyzpdqywl_3DIFctve1qUcrOsq2e1S-oaegyJ858KKCeOeJR8ss)

# Patron masque buccal

## Matériel

- tissus pas trop épais
- élastique ou ruban
- ciseaux
- pinces et épingles
- fer à repasser
- fil
- aiguille machine adaptée au tissu choisi



### Étape 1 : découpe

- Imprimer et découper le patron
- Reporter sur le tissu (ainsi que l'emplacement des plis.)
- Découper le tissu



### Étape 2 : couture haut

- Superposer les pièces de tissus endroit contre endroit
- Coudre le haut, surfiler à l'opposé (n'apparaît pas sur ma photo)



### Étape 3 : marquer les plis

- Marquer les plis au fer à repasser. Celui du rabat, ceux des plis centraux (cela doit faire un accordéon vers le bas avec des plis apparent de 1cm) et le petit ourlet à l'opposé du rabat
- Placer les liens (n'apparaissent pas sur ma photo)



### Étape 4 : coudre

- Coudre le petit ourlet et surfiler les grands cotés de la pièce pour maintenir les plis, les liens et le rabat en place

### Étape 5 : couture finale


- Plier en deux votre ouvrage le long de la couture centrale.
- Piquer les petits cotés
- Retourner



Il est possible d'insérer un filtre dans cette poche

# Document original : SFP SANTE

[https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317\\_TutoMASK\\_COVID19\\_NL.pdf?fbclid=IwAR2ow8elyzpdqywl\\_3DIFCtve1qUcrOsq2e1S-oaacyJ858KKCeOeJR8ss](https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317_TutoMASK_COVID19_NL.pdf?fbclid=IwAR2ow8elyzpdqywl_3DIFCtve1qUcrOsq2e1S-oaacyJ858KKCeOeJR8ss)

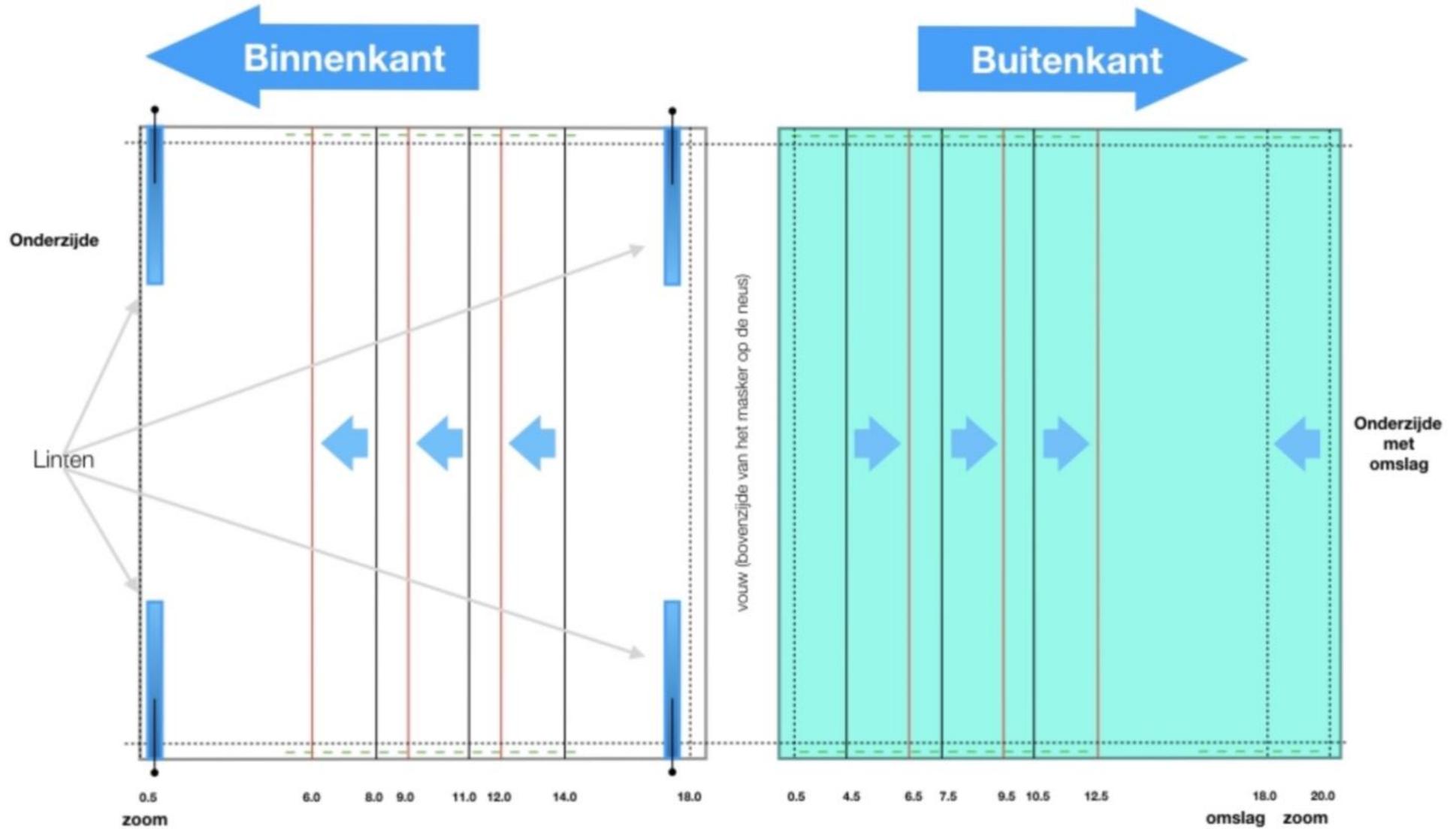

Aftekenen van het patroon

**Patroon 20 x 18.5 cm + 20 x 20.5 cm**  
**Medisch verzorgingsmasker met vervangbare filter**

